

Produktutveckling

Framöver kommer tejhaklappen från oss på Abena att se annorlunda ut.



Haklappen har tidigare haft en rundad halsöppning (se vänster bild). Istället för den rundade öppningen kommer det finnas en öppningsbar slits (se höger bild).

Så här använder du tejhaklappen med slits

Slitsen dras enkelt isär med ett mjukt ryck, som gör att det skapas en öppning vid halsen.



Haklappen fästes sedan med tejen mot axlarna.



Fickan vänds enkelt ut och in för att effektivt samla upp eventuell vätska.

Vänligen kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning,
Fatima Lindblom, Abena AB
0470 446 19
fali@abenaab.se