

# ZirClean®

## Restoration Cleaner

ZirClean är en rengöringsgel avsedd för icke-abrasiv rengöring av bindningsytor på zirkonia (och andra protetiska material) efter intraoral inprovning.

Under inprovning bildar fosfat i saliven en jonbindning med zirkoniumkeramer som försämrar bindningsstyrkan vid cementering. Denna kontamination kan inte enkelt avlägsnas genom att skölja i vatten eller med ultraljudsrengöring. För att kunna bryta denna jonbindning krävs en basisk lösning såsom ZirClean, som innehåller kaliumhydroxid (KOH, pH13).

ZirClean hjälper till att skapa en pålitlig adhesiv cementering genom att avlägsna fosfatkontamination på zirkonia (liksom även andra keramiska och metalliska ersättningsytor), som uppstår under inprovning.\*


### Produktfördelar

- ▶ Behöver inte blandas, snabb och enkel att använda
- ▶ Lätt att applicera och avlägsna
- ▶ Hjälper till att skapa ett pålitligt cementeringsresultat\*
- ▶ Kontaminanter såsom saliv avlägsnas så att en bättre bindningsstyrka kan erhållas efter inprovning\*


### Klinisk betydelse

Användningen av ZirClean hjälper till att skapa ett pålitligt cementeringsresultat med zirkoniumersättningar efter intraoral inprovning.\*

\*I jämförelse med obehandlade ytor. Biscodata.

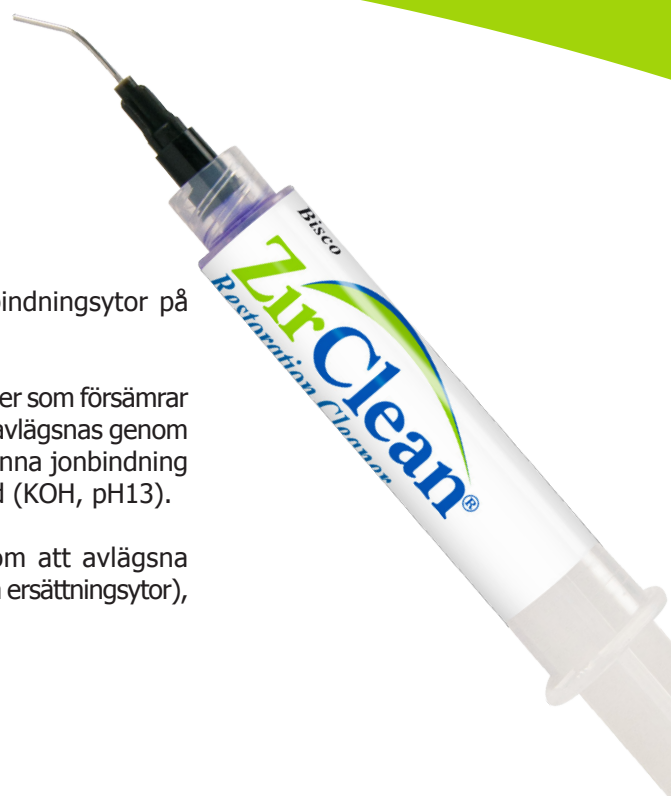

### Bindningsstyrka till zirkonia<sup>†</sup> (MPa) med olika rengöringsätt

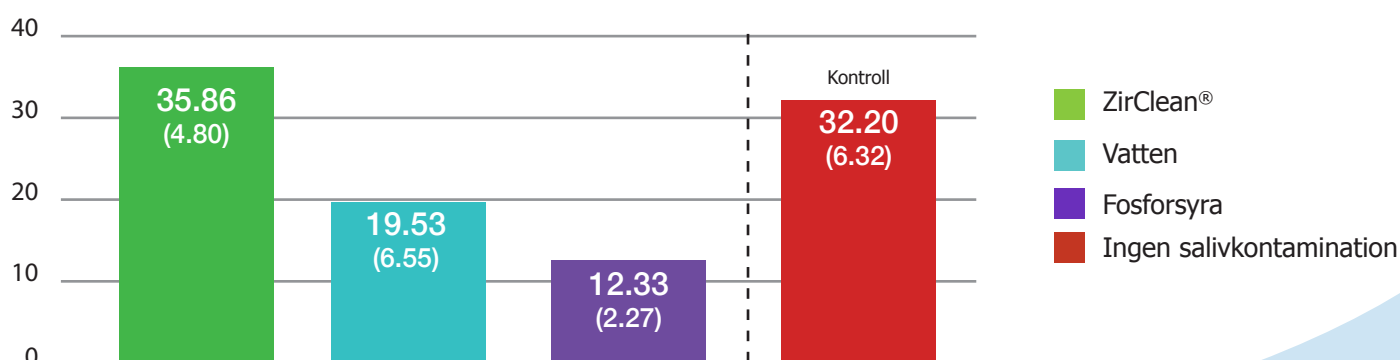

<sup>†</sup>Bindning efter salivkontamination. Ultradent skjuvhållfasthetstest använd med Z-Prime™ Plus och Duo-Link Universal™

### RELATERADE PRODUKTER



ALL-BOND UNIVERSAL®



Z-Prime™ Plus

### BESTÄLLNINGSPÅSÖKNING

1 spruta 5g (5ml), 30st engångskanyler, bruksanvisning ..... B-7351P (art nr 4035)