



SciCan

OPTIM[®] 1

ENSTEGSRENGÖRINGS-
OCH DESINFEKTIONSMEDEL

Aktiva ingredienser: **0,5 % väteperoxid**



1 MINUT
KONTAKTTID*

Snabbt och skonsamt

Med OPTIM 1 behöver du inte kompromissa mellan att arbeta effektivt och att vara skyddad. Med sin snabba bredspektrala kontakttid är det ett av de snabbast verkande och mest effektiva rengörings- och desinfektionsmedlen. Det är dessutom säkert att använda och skonsamt för dig och för ytor. Skapa en perfekt balans – med OPTIM 1 kan du vara säker på att du följer tillämpliga standarder och skyddar dina patienter, din personal och miljön.



Snabbt desinfektionsmedel med brett spektrum

Ytorna måste förbli våta under hela kontakttiden för att desinfektion ska kunna ske.

- › Verkar på adeno-, polio- och murint norovirus på bara **30 sekunder** i enlighet med EN 14476
- › Tuberkulocid och fungicid effekt på **1 minut**
- › Baktericid och virucid effekt på **30 sekunder** i enlighet med EN 13727 och EN 14476
- › **Full virucid effekt på 2 minuter** i enlighet med RKI/DVV-standarden (polio-, adeno-, murint norovirus, SV40)
- › Effektivt på **1 minut** i enlighet med EN 16615
- › Utmärkt vätkbarhet – förblir våt under hela kontakttiden



Effektiv enstegsrengöring

Ett effektivt enstegsrengörings- och desinfektionsmedel avlägsnar organiska föroreningar samtidigt som det desinficerar.



Kompatibelt

Kompatibelt med ett stort antal hårda, icke-porösa material och ytor.



Snabbt och skonsamt

- › Fritt från artificiella doftämnen
- › Giftfritt
- › Icke-irriterande för hud, ögon och andningsorgan
- › Inga GHS-faropiktogram, signalord eller faroangivelser
- › Efterlämnar inga aktiva rester, bidrar inte till antimikrobiell resistens



Miljövänligt

Den aktiva ingrediensen väteperoxid bryts ned till vatten och syre och efterlämnar inga aktiva rester vilket minskar miljöpåverkan.

 **COLTENE**

* Verkar inom 1 minut i enlighet med de europeiska standarderna: EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (se baksida). Enligt kraven i den tyska standarden RKI/DVV är OPTIM 1 FULLT VIRUCID inom 2 minuter.



Korta kontakttider

OPTIM 1 har bevisats ha överlägsna egenskaper. Jämna kontakttider är kortare vilket säkerställer att tillämpliga standarder följs. Samtidigt skapas förtroende för att desinfektion har uppnåtts.

OPTIM 1 har bevisats vara effektiv mot sjukdomsalstrande virus som är svåra att döda, såsom adeno-, polio- och murint norovirus. Detta gör att du kan vara säker på att din anläggning skyddas mot oroväckande patogener.

Desinfektionseffektivitet

EN 14348 – tuberculocid	Mykobakterier	Terrae	1
EN14476 – virucid	Icke-höljebärande virus	Adenovirus	30 sekunder
		Poliovirus	
		MNV	

RKI/DVV virucida egenskaper** (endast Tyskland)

Fullt virucid:
2 minuter

EN 16615 – avtorkning effektivitetstest***	Bakterier	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
	Jäst	C. Albicans	1
EN 13727 – baktericid	Bakterier	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	30 sekunder
EN 13624 – jästicid och fungicid	Jäst	C. Albicans	1
	Svamp	Aspergillus brasiliensis	1

Rengöringseffektivitet

Enstegsrengöring

Säkerhet

Farosymboler enligt GHS-kraven	Ingen krävs
Icke-irriterande för ögon	Ja
Icke-irriterande för hud	Ja

* Kontaktid i minuter om inget annat anges.

** FULLT VIRUCID betyder att desinfektionsmedlet kan avaktivera höljebärande och icke-höljebärande virus, i enlighet med de tyska DVV-teststandarderna. För att anspråk ska kunna göras på full virucidal effekt måste desinfektionsmedlet klara av att avaktivera adeno-, polio-, SV40- och murint norovirus.

*** EN 16615 är en obligatorisk EU-standard för testning av effektiviteten i avtorkningsprocessen.

Beställningsinformation för OPTIM 1

Användningsklara förfuktade servetter

OPTEU1-12W Användningsklara servetter 15 x 18 cm (12 x 160 ark/ask)

Vätska

OPTEU1-4x4 1 låda med 4 x 4 liter

Tillbehör

FND30 Pump för 1 stor flaska

För mer information
kontakta:

Ombud i EU:
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
Tyskland
Tel: +49 (0)7561 98343 - 0
Fax: +49 (0)7561 98343 - 699
E-post:
customerservice_eu@scican.com