



## DAX Ytdesinfektion Extra

DAX Ytdesinfektion Extra är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord etc. samt metallföremål. DAX Ytdesinfektion Extra är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som t.ex. Hepatit B, C och HIV.

Exempel på användningsområden är inom hälso-, sjuk- och tandvård samt hos veterinärkliniker. Produkten är även lämplig för användning inom livsmedelshantering och barnomsorg.



# DAX Ytdesinfektion Extra

## Hygien

En god hygien och rutinmässig användning av desinfektionsmedel är mycket viktigt för att förebygga smittspridning.

## Gör så här

- Dränk in en torkduk med outspätt medel.
- Torka ytan upprepade gånger tills ytan är ren.
- Låt lufttorka.

## Metallföremål

- Torka bort organiskt material såsom t.ex. blod från föremålet.
- Lägg ner föremålet i outspätt medel och låt ligga i minst 1 minut.

## Produktfakta

DAX Ytdesinfektion Extra är en färdig brukslösning som består av isopropylalkohol. Alkoholstyrkan är 45 volym-

procent. DAX Ytdesinfektion Extra verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet. Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas. Korrosionsinhibitor hindrar metallföremål från att rosta. Produkten har även en god upplösande effekt på t.ex. spill av blod.

DAX Ytdesinfektion Extra är CE-märkt och uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel.

## Lagring och hållbarhet

Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning. Hållbarhet i obruten förpackning, se datummärkning.

## Miljö

Samtliga förpackningar är återvinningsbara och avger inte några skadliga ämnen vid ev. förbränning.



### Förpackningar:

- 1000 ml flaska
- 3000 ml dunk



DAX Hudvård, Hudtvätt och Desinfektion är en serie produkter med väl dokumenterad funktion baserad på lång erfarenhet. DAX har utvecklats med särskild dermatologisk hänsyn och genomgår noggrann kvalitetskontroll.

### Opus Health Care AB

Box 50208, SE-202 12 Malmö, Visiting address: Murmansgatan 120

Tel: +46 (0) 40 680 15 40, Fax: +46 (0) 40 680 15 49, E-mail: info@opushc.se, www.opushc.se

Brands: DAX, Neutral, zendum

A  Company

