



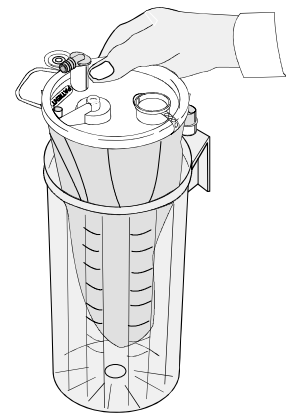

BRUKSANVISNING SERRES SUGSYSTEM

Uppkoppling

- Placera kanistern i en upprätt position i en hållare. Anslut slangen från sugkällan till kanisterns grå vinkelkonnektor
- Vik ut sugpåsen och placera den i kanistern
- Sätt på sugkällan
- Håll för den vita konnektorn / patientanslutningen med ett finger så sugspåsen på plats i kanistern
- Kontrollera att sugpåsen expanderar inuti kanistern och ställ in önskat sugtryck
- Anslut patientsugslangen till den vita kopplingen på sugpåsen

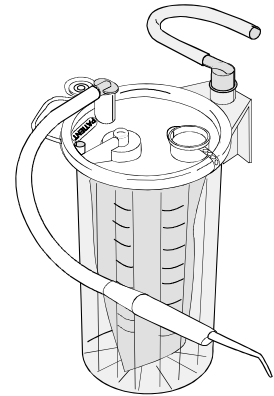

Avslut

- Ta bort patientsugslangen inklusive den vita konnektorn
- Förslut hålet med den gröna propp som sitter vid sidan av sugpåsen på locket
- Stäng av sugkällan



Observera

- Sugkanistern och dess grå vinkel konnektor kan diskas i maskin (85°C) eller autoklaveras (121°C)
- Serres sugpåsar är gjorda av polyetylen, och kan säkert kastas i enlighet med sjukhusets instruktioner

