

# PRODUKTINFORMATION

---

## GAMA SALIVSUGRENT

SALIVSUGRENT är ett miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel för användning till salivsugsanläggningar och fontäner inom tandvården.

SALIVSUGRENT löser mycket effektivt och snabbt de föroreningar som förekommer i salivsuganläggningen.

SALIVSUGRENT är inte desinficerande. För desinfektion i sugsystemet rekommenderas genomsugning med 42% isopropylalkohol IPA (250 ml).

SALIVSUGRENT är skonsam mot suganläggningen och garanterar en fullgod funktion av Ert system.

SALIVSUGRENT bildar inget skum.

SALIVSUGRENT är bakteriologiskt testad.

Rengöring:

Dosering: - 1 dl/ 2,5 liter vatten.

0,5 liter av den färdiga lösningen hälls i fontänen, resterande 2 liter användes till genomsugning av slangarna.

Desinfektion – efter rengöring, genomsugning med 250 ml 42% IPA(Isopropanol).

Rengöring och desinfektion anpassas efter sugsystemet.

Lagringsbeständighet: minst 1 år i oöppnad förpackning

Övriga egenskaper:

Innehåller ej klor eller fenoler

Inga starka och obehagliga dofter

Inga kladdiga eller igensatta silar vid rengöring

Skumfri

Överlägsen rengöring förmåga som ökar driftsäkerheten genom att stopp i slangar undviks

Fräter inte på plast eller annat material därmed minimeras underhållskostnaderna

Miljöanpassad och biologiskt nedbrytbar

Tillverkas i Sverige