

LIFE ♥ CLEAN

DISINFECTANT



Miniguide



LifeCleans CE-märkta produkter

- Maximal avdödning
- Snabb desinfektion
- Ingen återapplicering
- Miljösäker lösning
- Bred materialkompatibilitet



Kan användas för desinficering på t.ex.:

- Sängskenor
- Alarmknapp
- Telefonter
- Fjärrkontroller
- Infusionspump / stativ
- Toalett / toalettstol
- Sängbord
- Strömbrytare
- Dörrhandtag
- Andnings- och annan sängutrustning
- Tangentbord
- Stolar
- Skärmgardin
- Semi-kritiska instrument

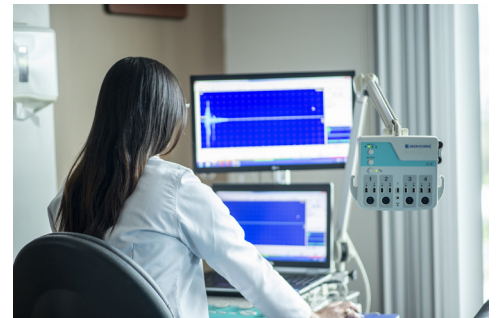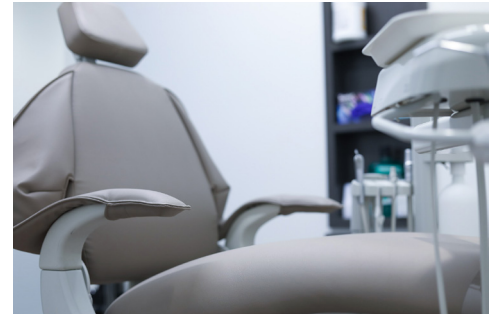

Smittämne	Kontaktid	Standard
✓ Sporer	2-5 min	EN 17126
✓ Mycobakterier	1-2 min	EN 14563
✓ Virus	1 min	EN 14476
✓ SARS-CoV-2	30 sek	EN 14476
✓ Fungicid/jäst	1 min	EN 13624
✓ Bakterier	1 min	EN 13727

För fullständig lista se Microbiological Efficacy Summary.



www.lifeclean.se



Se på videon

Norovirus | Clostridium difficile | MRSA | ESBL

För fullständig lista se Microbiological Efficacy Summary.

LIFE ♥ CLEAN

CE-PRODUKTER

Avsedd användning

High-level desinfektionsmedel med högt avdöningsspektrum för icke-invasiva medicintekniska produkter, avsedda för rena förhållanden ("synligt rent")

Effektivt mot b.l.a.



Organism	Kontaktid Clean	Standard
✓ Sporidical	5 min	EN 17126
✓ Mycobactericidal	2 min	EN 14563
✓ Virucidal	1 min	EN 14476
✓ SARS-CoV2	30 sec	EN 14476
✓ Fungicidal / Yeast	1 min	EN 13624
✓ Bactericidal	1 min	EN 13727

Avsedd användning

High-level desinfektionsmedel med högt avdöningsspektrum för icke-invasiva medicintekniska produkter, avsedda för smutsiga förhållanden ("synbart smutsigt")

Effektivt mot b.l.a.



Organism	Kontaktid Clean	Kontaktid Dirty	Standard
✓ Sporidical	2 min	2 min	EN 17126
✓ Mycobactericidal	1 min	-	EN 14563
✓ Virucidal	1-2 min	-	EN 14476/16777
✓ SARS-CoV2	30 sec	-	EN 14476
✓ Fungicidal / Yeast	1 min	2 min	EN 13624/14562/16615
✓ Bactericidal	1 min	2 min	EN 13727/14561/16615




Användarinstruktioner 2021-02

- 1 Endast för professionellt bruk. Följ lokala riktlinjer. Använd handskar.
- 2 PPE bör användas vid behov*
- 3 Ta bort synlig smuts
- 4 Applicera en generös mängd lösning på servett
- 5 Torka ytan mekaniskt med servett för desinfektion
- 6 Låt LifeClean verka under önskad kontaktid/applikationstid
- 7 Markera öppningsdatum på etiketten. Stäng öppnad flaska

* För mer information: Säkerhetsdatablad för LifeClean.

Hållbarhetstid & förvaring

- Kontrollera utgångsdatum, tryckt på flaskan
- Använd en öppen flaska inom 4 veckor för sporidical förmåga
- Färgindikator för aktivitet:

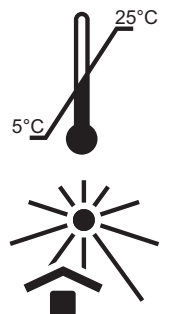

400 PPM

200 PPM

50 PPM

10 PPM

[————— High-level —————] [Intermediate-level] [Low-level]



© LifeClean International AB
LC-ART-0344 ver03 Oct 2022
Images by Freepik from www.flaticon.com



Rekommenderad som high-level ytdesinfektionsmedel.