

TempoSIL[®]

Det Första Petbara Temporära Cementet

Enkel Applicering

– Bekväm 5 ml Automix Ampull med Oral Spets

Problemfri Rengöring

– Inget Överskottsmaterial Kvar på Preparation eller Restauration

Tidsbesparande

– Ideal Arbets- och Stelningstid

Unik Siloxan Z_NO™ Formula

– Suverän Marginal Försegling

TempoSIL®

TempoSIL är ett unikt** A-silikon och zink oxid baserat temporärt cement med ett Silan medel för optimal adhesion och suverän marginal försegling. Denna formulan ger ett starkt, elastiskt cement som enkelt kan petas bort från mjukvävnad och ut ur restorationen. Rengöringar är problemfria! Den bekväma automix ampullen med oral spets ger en snabb, instrumentfri applicering.

Enkel applicering... Problemfri Rengöring



1 Applicera direkt i restorationen med den speciella Oral Spetsen



2 Peta bort överskottsmaterial efter 2 min




3 Borttagbar utan att lämna cementrester på preparationen



4 TempoSIL petas enkelt bort – Inga flagor eller småbitar

Arbetstid:
max. 50 s

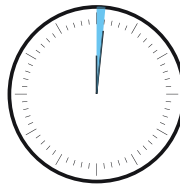

Oral Stelnings Tid:
min. 2 min



Suverän Marginal Försegling


In vitro studie, Universitetet i Geneve (Prof. I. Krejci, Schweiz)

Evaluering av färgpenetration av TempoSIL vs. TempBond i temporära kronor efter 6 veckor i 37°C vatten.

TempoSIL



TempoSIL suveräna marginala försegling motverkar färgpenetration – Urlakning är minimal.

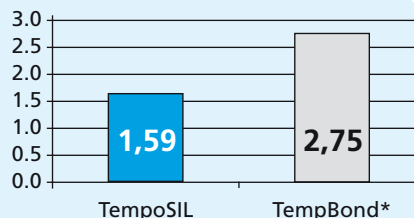


Gips penetrationen av de två materialen var en statistiskt markant skillnad.

Färre Recementeringar

Retentionskraft efter thermocykling

TempoSIL visar 64% högre retention än ledande konkurrenter.

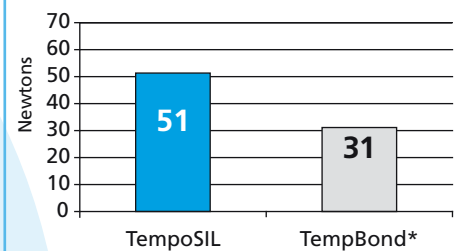

Order Information

6720 TempoSIL Intro

2 x 5 ml ampuller,
20 MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/WITH OT***

6725 TempoSIL Refill

4 x 5 ml ampuller

6749 MT/BROWN/CLEAR/WHITE/56/WITH OT***

40 st

www.coltenewhaledent.com
© 2005 Coltène/Whaledent AG



Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 53 00
Fax +41 (0)71 757 53 01
office@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
productinfo@coltenewhaledent.com

*TempBond är inte ett TM av
Coltène/Whaledent
**patentsökt
***MT = Mixing Tip, OT = Oral Tip

Coltène/Whaledent AG
Ångbyplan 69
SE-168 56 Bromma, Sverige
Tel: 08-687 47 40
Fax: 08-687 47 45
info@coltenewhaledent.se

coltène
whaledent